

DEDIACARD Cardio

Produktinformationen



Wissen ist der Anfang von Sicherheit.

Ihre Therapie braucht eine feste Basis der Entscheidung.
Eine solide Grundlage, der Sie vertrauen können.
Dieses Vertrauen ist unser Anspruch -
eine klare Aussage, konkret und sichtbar.


Wissen ist sichtbar.

Devidia

Cardio zeigt bereits 20 Minuten nach Infarkt an, ob es sich tatsächlich um einen gehandelt hat. Akute Patientenfälle können damit erstmals sicher diagnostiziert werden

Troponin I wird erst 8 Stunden nach Infarkt im Körper gebildet. Akute Ischämien können dadurch nicht erkannt werden. EKG Messungen sind in 25% aller Fälle unauffällig. Weibliche Personen zeigen oft unübliche Symptome. Mit Cardio steht erstmals ein Schnelltest aus deutscher Fertigung zur Verfügung der auch akute Herzinfarkte sicher bestimmen kann. Durch die 24-monatige Haltbarkeit und die einfache Durchführung ist Cardio ein idealer Begleiter für jeden niedergelassenen Arzt, der auch Hausbesuche macht.

Cardio besteht aus zwei Biomarkern in einem Test: hFABP und Troponin I. Akute Infarkte innerhalb der ersten Stunden werden durch hFABP angezeigt. Spätere Infarkte durch Troponin I. Das Diagramm verdeutlicht das Prinzip von Cardio.

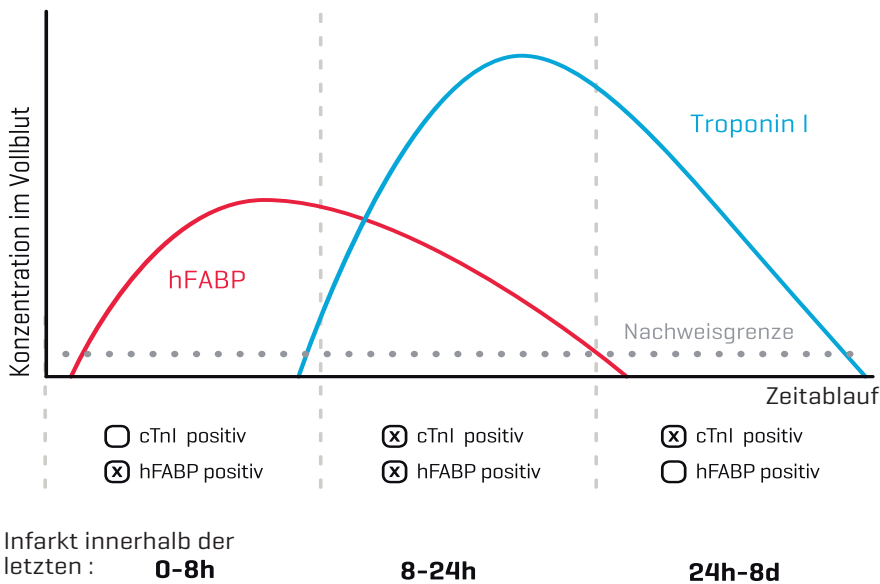

Technische Leistungsdaten

Troponin I

Sensitivität: 99%
Spezifität: 98%

hFABP

Sensitivität: 70%
Spezifität: 99%

Probenmatrix: Blut, Plasma, Serum
Laufzeit: 10 Minuten

Lagerung: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 24 Monate

Probennahme: 1 Tropfen Blut venös oder aus der Fingerbeere

Abrechnungsempfehlung

EBM: 32150 [11,30€]
GOÄ: A3232 [11,66€]

Vorteile gegenüber Troponin I Tests

Herzinfarkt bereits 20 Minuten nach erstem Symptom diagnostizierbar

24 Monate haltbar

Durchführung mit nur einem Tropfen Blut

RiliBäk konform

Testdurchführung:

Die Testdurchführung ist innerhalb weniger Sekunden erledigt. Einen Tropfen Probe aufgeben. Einen Tropfen Pufferlösung aus der Ampulle. 10 Minuten warten. Test auswerten und Ergebnisse notieren.

